

OCUhyl C®

oční kapky bez konzervačních látek

1. Co je OCUhyl C a na co se používá

OCUhyl C jsou sterilní oční kapky se zvlhčujícím, uklidňujícím a lubrikačním účinkem, určené pro zvláště citlivé oči. Díky obsahu kyseliny hyaluronové (což je přirozeně se vyskytující látka v oku a v jiných částech těla), poskytují tyto kapky efektivní úlevu a dlouhotrvající komfort při pocitu suchosti, pálení nebo únavy očí. Oční kapky OCUhyl C jsou navíc obohaceny přídatkem přírodního extraktu z měsíčku lékařského. Ten má ochranný účinek proti podráždění a regenerační účinek na epitel oka.

OCUhyl C bez konzervačních látek poskytuje dlouhodobou úlevu:

- Při snížené tvorbě slz, při syndromu suchého oka (keratokonjunktivitida sicca)
- Při poranění rohovky nebo spojivky
- Po operacích oka
- Při nepříjemných pocitech (štipání, pálení, pocit písku v očích) doprovázejících prostá podráždění oka větrem, prachem, kouřem, znečištěným ovzduším atd.
- Při zvýšené únavě očí způsobené dlouhodobým čtením, řízením motorových vozidel, sledováním obrazovky televize nebo monitoru počítače a při měnící se ostroty zrakové v průběhu dne
- Při nošení kontaktních čoček

OCUhyl C neobsahuje žádné konzervační ani antimikrobiální přísady. Proto jsou tyto kapky určeny také pro citlivé oči a pro nositele kontaktních čoček. OCUhyl C mohou používat dospělí, mladiství i děti.

OCUhyl C je určen pouze k vnějšímu použití. Používá se k podpurné léčbě při nízké produkci slz, při pocitech cizího tělíska v oku, pocitech únavy nebo podráždění. Používá se také k posílení ochranného slzného filmu na povrchu rohovky a spojivky oka. OCUhyl C se může používat i po čas nošení kontaktních čoček.

2. Co potřebujete vědět před tím, než použijete OCUhyl C

Nepoužívejte OCUhyl C, pokud jste alergický(á) na kteroukoliv složku přípravku. Pokud současně používáte i jiné oční přípravky, doporučuje se dodržet alespoň 5 minutový interval mezi nakapáním jednotlivých přípravků.

3. Jak používat OCUhyl C

Obvykle se aplikuje 1 kapka 1 až 3 krát denně, může se však kapat i častěji.


OCUhyl C je možné používat dlouhodobě.

Nositelé kontaktních čoček


OCUhyl C se může používat při současném nošení kontaktních čoček.

Upozornění před aplikací


1. Umyjte si ruce a pohodlně se posaďte nebo postavte
2. Odšroubujte uzávěr se závitem

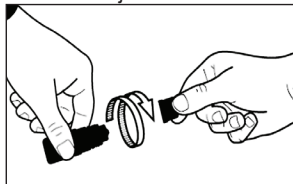


3. Přidržíte lahvičku směrem dolů mezi palcem a ostatními prsty
4. Před první aplikací se doporučuje jemným stlačením lahvičky zkušebně odkápnout první kapku mimo oko, jelikož při silném a nerovnoměrném stáčení může roztok vystříknout ve větším objemu
5. Ukazováčkem jemně potáhněte dolní víčko postiženého oka

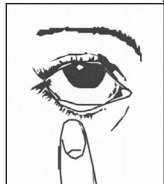

6. Přiblížte konec kapátka k Vašemu oku tak, aby se nedotklo oka nebo okolí oka
7. Jemně stlačte lahvičku, aby do oka vkápla jedna kapka. Potom uvolněte dolní víčko a pomalu oko zavřete, aby se **OCU^{hyf}C** rovnoměrně rozprostřel po povrchu oka. Pro další kapku je třeba nechat nasát vzduch zpět do plastové lahvičky, aby se vrátila do původního stavu a teprve potom pokračovat v aplikaci do oka doporučeným způsobem. Upozorňujeme, že po stlačení může uběhnout několik vteřin, než dojde k vykápnutí kapky. Nestláčejte příliš silně.

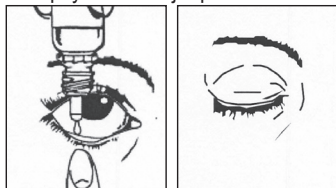

8. V případě potřeby postup opakujte i pro druhé oko.

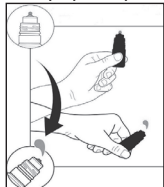

9. Po použití oklepejte lahvičku bez dotyku na kapátko směrem dolů, aby se odstranila přebytečná zůstávající kapka. To je potřebné pro zabezpečení sterility následujících kapek.

10. Bezprostředně po použití nasadte pevně uzávěr zpět na lahvičku.

4. Jaké jsou možné vedlejší účinky

Zřídka se bezprostředně po aplikaci může vyskytnout pocit přechodného mírného pálení.

Může se též vyskytnout alergická reakce.

V případě výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jakýchkoliv jiných neočekávaných reakcí se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka.

5. Co **OCU^{hyf}C** obsahuje

Hyaluronát sodný 1,2 mg/ml, extrakt měsíčku lékařského, chlorid sodný, trihydrát octanu sodného, citrát sodný, chlorid draselný, chlorid vápenatý, chlorid horečnatý, čištěná voda.

6. Jak uchovávat **OCU^{hyf}C** a další informace

Lahvičku uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25°C.

Chraňte před chladem a mrazem.

Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Tato doba je uvedena na štítku lahvičky nebo na papírové krabičce u ikony přesýpacích hodin. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

OCU^{hyf}C nepoužívejte déle jak tři měsíce po prvním otevření lahvičky.

Velikost balení: 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA spol. s r.o., Orišková 11, 821 05 Bratislava,
Slovenská republika

Tel.: +421 243 333 786

Fax: +421 243 638 743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu



Datum poslední revize textu: duben 2020